



All samples submitted to TVMDL for testing become the property of the agency and may be tested as part of state/federal surveillance programs, utilized for research purposes and/or development of new assays. TVMDL is unable to return samples to the client unless prior arrangements are made and approved by the agency Director or designee.

College Station Lab		Amarillo Lab		Accession # _____
PO Drawer 3040 483 Agronomy Rd		PO Box 3200 6610 Amarillo Blvd West		Client PO # _____
College Station TX 77841 College Station TX 77840		Amarillo TX 79116 Amarillo TX 79106		
Ph: 979-845-3414		Ph: 806-353-7478		
Ph: 888-646-5623 Fax: 979-845-1794		Ph: 888-646-5624 Fax: 806-359-0636		
Owner _____	***	Indicar la dirección de correo electrónico del propietario en el formulario de envío para que este pueda recibir informes junto con el veterinario que realiza el envío.		
Research Agreement # _____	ACCOUNT # _____	Clinic _____		
Address _____	City _____	State _____ Zip _____		
City _____	City _____	State _____ Zip _____		
E-mail _____	Phone # _____	Fax # _____		
Phone # _____	Fax # _____	Comment _____		
Fax # _____	Fax # _____	DVM _____		

Prueba para la tric: paso a paso

El Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M (Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory, TVMDL) ofrece pruebas de diagnóstico oportunas y precisas para detectar *Tritrichomonas foetus*, el parásito que causa la tricomoniasis bovina (o "tric"). Empleamos la tecnología más actual disponible a fin de brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Sin embargo, solo podemos asegurar que la prueba de su muestra se hará sin demoras si nos llega ya lista.

Preparación adecuada

- Recoja la muestra en una bolsa no vencida. Si esta está vencida, no podemos garantizar la validez de su muestra y no calificará como una prueba "oficial".
- Evite la contaminación cruzada. No debería ingresar sangre, materia fecal ni suciedad en la bolsa.
- Siga las instrucciones del fabricante para cerrar y sellar la bolsa.
- Incube la muestra a 37 °C durante las 48 horas previas al envío para ayudarnos a disminuir el plazo de entrega de los resultados de la prueba.

Envío en forma segura

- Elija un transporte confiable de manera que su muestra llegue a TVMDL en 96 horas como máximo después de su recolección. Le recomendamos que no utilice el Servicio Postal de los Estados Unidos.
- Envíe la muestra y los formularios completos.
 - o Para la prueba oficial, se requieren el formulario de registro de pruebas de tricomoniasis de la Comisión de Salud Animal de Texas (Texas Animal Health Commission, TAHC), la identificación del animal, la fecha de recolección y la firma del veterinario.
- Proteja la bolsa con el embalaje apropiado.

Recepción de resultados

- Sepa comprender que las muestras de tric deben incubarse durante 48 horas. Si necesita la muestra para una fecha determinada, planifique con antelación el momento de la prueba.
- TVMDL solo puede entregar resultados al veterinario o al dueño que envíe la muestra.
- Los dueños deben anotar tanto sus correos electrónicos de contacto como los de su veterinario. Los veterinarios también deben anotar el correo electrónico del dueño para que este reciba los resultados.

Para obtener más información sobre las pruebas para la tric u otros servicios de TVMDL, visite tvmdl.tamu.edu.